



DE – SELBSTHAFTENDER SCHAUMSTOFFWUNDVERBAND MIT MIKROADHÄSIVER TLC-MATRIX

PRODUKTBESCHREIBUNG

UrgoTül Foam Border ist ein selbsthaftender, absorbierender Schaumstoffwundverband mit mikroadhäsiver TLC-Matrix, einer innovativen Technologie, die von Laboratoires URGO entwickelt wurde. UrgoTül Foam Border besteht aus:

- einer mikroadhäsiven TLC-Matrix in Kombination mit
 - einer absorbierenden Polyurethan-Schaumstoffkomresse und einem superabsorbierenden Vlies sowie
 - einem wasserundurchlässigen und dampfdurchlässigen äußeren Träger mit Silikonhafrand.
- Diese spezifische Kombination ist eine patentierte Zusammensetzung.

EIGENSCHAFTEN

UrgoTül Foam Border bietet alle Vorteile der Lipidokolloid-Technologie (TLC) und der adhäsiven Silikonhafränder (Aufrechterhaltung eines physiologischen Milieus, Verbesserung der Wundheilung und atraumatischer, schmerzfreier Verbandwechsel).

Lipidokolloid-Technologie (TLC: Technology Lipido Colloid)

Die Lipidokolloid-Technologie (TLC) ist eine innovative, patentierte Technologie, die aus der einzigartigen Kombination von Polymeren und Hydrokolloidpartikeln besteht. Die TLC-Matrix fördert die Wundheilung und ermöglicht den atraumatischen und schmerzfreien Verbandwechsel. Die Hydrokolloidpartikel bilden in Kontakt mit dem Wundexsudat ein Gel und schaffen ein physiologisches Wundmilieu, welches die Wundheilung unterstützt, so dass die in den Reparaturprozess involvierten Schlüsselzellen (Fibroblasten, Keratinozyten, Makrophagen) ihre Wirkung entfalten können.

UrgoTül Foam Border verbessert somit das Ergebnis der Wundheilung.

Die Wirksamkeit der TLC-Matrix wurde in zahlreichen klinischen Studien mit mehr als 36.000 Patienten nachgewiesen.

Die absorbierende Polyurethan-Schaumstoffkomresse und das superabsorbierende Vlies von **UrgoTül Foam Border** gewährleisten eine optimale Drainage der Exsudate und schützen vor Mazerationen. **UrgoTül Foam Border** kann auch unter einem Kompressionsverband angewendet werden, sofern dieser verordnet wurde.

Der wasserfeste Träger von **UrgoTül Foam Border** ist weich, sehr anpassungsfähig und nicht okklusiv: Er sorgt für eine gute Anpassung des Wundverbandes an das anatomische Relief der Wunde, verhindert ein Austreten von Flüssigkeiten und schützt die Wunde vor einer bakteriellen Kontamination von außen. Seine hohe Dampfdurchlässigkeit sorgt für die Ableitung der überschüssigen Exsudate und begrenzt das Mazerationsrisiko. Er folgt den Körperbewegungen und gewährleistet so den Patientenkomfort. Dank seiner Silikonhafränder besitzt der Verband eine gute Haftung bei hoher Hautverträglichkeit und kann einfach repositioniert werden. Durch den Hafrand ist eine Fixierung mit einem Sekundärverband nicht erforderlich. Dank seiner Transparenz ist es möglich, die Sättigung des Verbandes zu beobachten und den Verband nur zu wechseln, wenn dies notwendig ist.

Die Eigenschaften von **UrgoTül Foam Border** sind somit vielfältig:

- Verbesserung der Wundheilung
- Absorption und Drainage der Exsudate zur Begrenzung des Mazerationsrisikos
- Aufrechterhaltung eines für die Wundheilung günstigen physiologischen Milieus
- Atraumatische und schmerzfreie Verbandwechsel für die Patienten
- Wasserfeste Silikonhafränder
- Sehr anpassungsfähig und leicht zu repositionieren

INDIKATIONEN / ANWENDUNGSGEBIETE

UrgoTül Foam Border wird empfohlen zur Behandlung exsudierender akuter Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden) und chronischer Wunden (z.B. Unterschenkelgeschwüre, Druckgeschwüre, Diabetische Fußulzera). Die Sakrumform (**UrgoTül Foam Border Sacrum**) wird empfohlen zur Behandlung von Wunden im Sakralbereich (z.B. Druckgeschwüre am Sacrum).

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

- Vorbereitung der Wunde:
 - Die Wunde gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen.
 - Wenn zuvor ein Antiseptikum verwendet wurde, die Wunde vor dem Auflegen von **UrgoTül Foam Border** sorgfältig mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.
 - Die Wundumgebung sorgfältig trocknen.
- Anlegen (Applizieren) des Wundverbandes:
 - Die Schutzfolien von der mikroadhäsiven Seite des Wundverbandes abziehen.
 - Die mikroadhäsive Seite von **UrgoTül Foam Border** direkt auf die Wunde auflegen (der Abstand zwischen der Wunde und dem adhäsiven Silikonhafrand sollte mindestens 1 cm betragen).
 - Den Wundverband über der Wunde glatt streichen.
 - Einen Kompressionsverband über dem Wundverband anlegen, sofern dieser verordnet wurde.
- Anlegen von **UrgoTül Foam Border Sacrum**:
 - Die Schutzfolien von der mikroadhäsiven Seite des Wundverbandes abziehen und den Wundverband mit dem spitzen Ende in Richtung der Sakralregion positionieren.
- Ablösen des Wundverbandes:
 - Die gesunde Haut nach unten drücken, eine Ecke des Wundverbandes anheben und diesen vorsichtig ablösen.
- Verbandwechsel:

Der Wundverband **UrgoTül Foam Border** sollte alle 2 bis 4 Tage gewechselt werden und kann, in Abhängigkeit von der Exsudatmenge und dem klinischen Zustand der Wunde, bis zu 7 Tage auf der Wunde belassen werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Da die Kompresse ein superabsorbierendes Vlies enthält, darf sie nicht zugeschnitten werden. Die Silikonhafränder dürfen jedoch mit einer sterilen Schere eingeschnitten werden, um den Wundverband an unterschiedliche anatomische Körperstellen anzupassen.
- Bei klinischen Anzeichen einer lokalen Infektion kann die Behandlung nach Einschätzung durch den behandelnden Arzt auf einen antibakteriellen Wundverband, wie z.B. **UrgoCell Silver**, umgestellt werden.
- Überschüssige Behaarung möglichst nahe der Haut entfernen, um einen guten Kontakt mit der Wunde sicherzustellen.
- Im Fall der gleichzeitigen Anwendung einer Creme, einer Salbe oder einer Emulsion, die Haut vor dem Auflegen des Wundverbandes trocknen lassen.
- Sterile Einzelverpackung zum Einmalgebrauch: Die Wiederverwendung eines zum Einmalgebrauch bestimmten Wundverbandes kann Infektionsrisiken hervorrufen.
- Überprüfen Sie die Unversehrtheit der sterilen Einzelverpackung. Nicht anwenden, wenn diese beschädigt ist.
- Den Wundverband nicht erneut sterilisieren.

www.urgo.de

Vertrieb in Deutschland: URGO GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 16, 66280 Sulzbach