

UrgoSuperabsorber

DE- SUPERABSORBIERENDE WUNDAUFLAGE, STERIL

PRODUKTBESCHREIBUNG

UrgoSuperabsorber ist eine sterile, superabsorbierende Wundauflage für mäßig bis stark exsudierende Wunden.

INDIKATIONEN

Exsudierende Wunden wie Ulzera cruris, Druckulzera, Diabetische Fußulzera und andere Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

UrgoSuperabsorber absorbiert und speichert das Exsudat im Verbandmaterial. Das Exsudat wird vertikal durch die Wundauflage aufgenommen und unter Gelbildung im Kern gespeichert, wodurch das Mazerationsrisiko an den Wundrändern minimiert und ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhalten wird.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

UrgoSuperabsorber sollte bei mäßig bis stark exsudierenden Wunden angewendet werden, bei denen es auf eine starke Absorption und wenige Verbandwechsel ankommt.

UrgoSuperabsorber kann sowohl als Primär- als auch als Sekundärverband verwendet werden.

- Wählen Sie eine Größe aus, die den Wundbereich abdeckt. Die Ränder des Saugkerns sollten die Wunde um mindestens 2 cm überlappen. **UrgoSuperabsorber** muss direkten Kontakt zum Wundgrund oder dem Primärverband haben.
- Fixieren Sie **UrgoSuperabsorber**. **UrgoSuperabsorber** kann auch unter einem Kompressionsverband getragen werden.
- **UrgoSuperabsorber** sollte entsprechend bewährter Verfahren zur Behandlung exsudierender Wunden regelmäßig überprüft werden, um eine vollständige Sättigung der Wundauflage zu vermeiden.
- Um den Verbandwechsel zu erleichtern, kann **UrgoSuperabsorber** mit steriler physiologischer Kochsalzlösung angefeuchtet werden.

Die verwendeten Wundauflagen als normalen Abfall behandeln.
Kontaminierte Wundauflagen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

UrgoSuperabsorber nicht zuschneiden! Die äußere Umhüllung muss intakt bleiben! Verwenden Sie **UrgoSuperabsorber** nicht, wenn die sterile Verpackung beschädigt ist!

UrgoSuperabsorber ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt!
Nicht erneut sterilisieren, die Wundauflage kann nicht wiederverwendet werden!

KONTRAINDIKATIONEN

UrgoSuperabsorber darf nicht auf trockenen oder schwach exsudierenden Wunden, Augen, Schleimhäuten, Sehnen oder in Wundhöhlen verwendet werden, da die Wundauflage im Zuge der Absorption anschwillt.

UrgoSuperabsorber darf nicht bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber der Wundauflage oder ihrer Komponenten verwendet werden.