


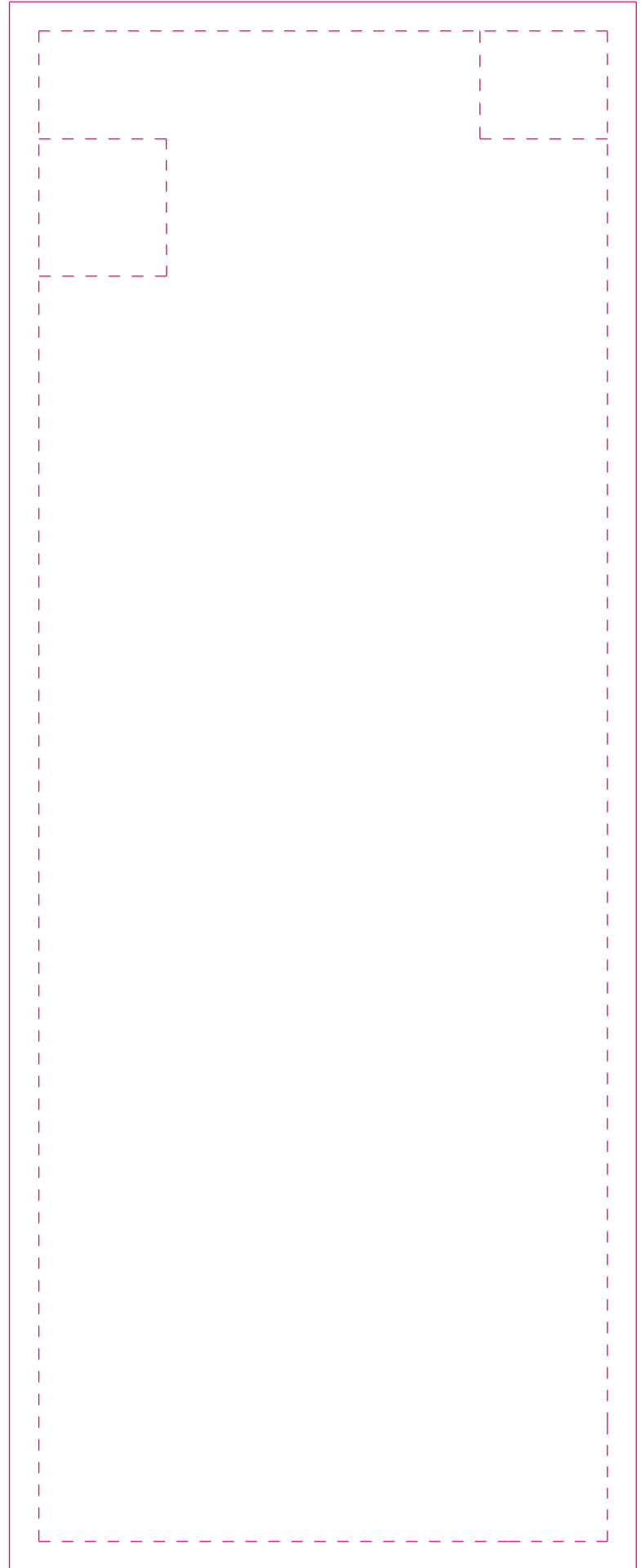


Insert - optive®

v-code 3962	optive® Zweifach wirksame, benetzende und osmoprotektive Augen-Pflegetrophen	71885EW14
3962	N	
		v-code 3962
<p>Die spezifische, zweifach wirksame Zusammensetzung von OPTIVE® verschafft lang anhaltendes Augenwohlgefühl. OPTIVE® benetzt die Augenoberfläche und spendet den Zellen der Augenoberfläche Feuchtigkeit durch Wiederherstellung des natürlichen osmotischen Gleichgewichts.</p> <p>Beschreibung:</p> <p>OPTIVE® ist eine sterile Lösung in einem Mehrdosenbehältnis, die Natriumcarboxymethylcellulose, Glycerol, Levocarnitin und Erythritol enthält. Sie ist mit PURITE® konserviert, das am Auge in natürliche Bestandteile der Tränenflüssigkeit zerfällt.</p> <p>OPTIVE® ist zur Anwendung mit allen Arten von Kontaktlinsen geeignet.</p> <p>Hinweise für die Anwendung</p> <p>Nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das/die Auge(n) geben.</p> <p>Vorsichtshinweise</p> <ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.• Lösung nicht einnehmen.• Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren und direkten Kontakt mit dem Auge vermeiden.• Flasche sofort nach Gebrauch fest verschließen.• Lösungsreste 6 Monate nach dem Öffnen verwerfen.• Nicht nach Ablauf des auf dem Produkt angegebenen Verfalldatums verwenden.• Für Kinder unzugänglich aufbewahren.• Bei Raumtemperatur aufbewahren.• Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn die Versiegelung des Verschlusses vor dem ersten Öffnen beschädigt ist.• Bei Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten zwischen den Anwendungen mindestens 5 Minuten liegen. <p>Warnhinweis</p> <p>Wenn Ihre Augenprobleme weiter bestehen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenarzt.</p> <p>Wie ist das Produkt erhältlich?</p> <p>OPTIVE® Augen-Pflegetrophen sind in Kunststoffflaschen mit 3 (unverkäufliches Muster) und 10 ml Inhalt erhältlich.</p> <p> Hersteller: Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irland</p> <p>STERILE A CE 0459 </p>		



Artwork created at 100%
Drop keylines and notes before printing
Part Number: 71885EW14
Drawing Number: 0196501
v-code: 3962