



v-code 3964	<b>OPTIVE PLUS®</b> Dreifach wirksame, benetzende und osmoprotektive Augen-Pflegetropfen	72477EW13
3964		
<b>GEBRAUCHSANLEITUNG</b>		v-code 3964
<p><b>OPTIVE PLUS®</b> hat eine spezifische, dreifach wirksame Zusammensetzung und verschafft lang anhaltendes Augenwohlgefühl. <b>OPTIVE PLUS®</b> benetzt die Augenoberfläche und spendet den Zellen der Augenoberfläche Feuchtigkeit durch Wiederherstellung des osmotischen Gleichgewichts <b>UND</b> schützt Ihre natürliche Tränenflüssigkeit mit einem ergänzenden Lipid.</p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <p><b>OPTIVE PLUS®</b> ist eine sterile Lösung in einem Mehrdosenbehältnis, das 0,5 % Natriumcarboxymethylcellulose, 1,0 % Glycerol, 0,25 % Rizinusöl, 0,5 % Polysorbat 80, 0,25 % Levocarnitin und 0,25 % Erythritol sowie 0,01 % des Konservierungsmittels PURITE®, das auf dem Auge zu natürlichen Bestandteilen der Tränenflüssigkeit abgebaut wird, enthält.</p> <p><b>Gebrauchsanweisung</b></p> <p>Nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das/die Auge(n) geben.</p> <p><b>Vorsichtshinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren</li> <li>• Lösung nicht einnehmen</li> <li>• Um Verunreinigungen oder mögliche Augenverletzungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren und direkten Kontakt mit dem Auge vermeiden</li> <li>• Die Flasche unmittelbar nach dem Gebrauch fest verschließen</li> <li>• Lösungsreste 6 Monate nach dem Öffnen verwerfen</li> <li>• Nicht nach Ablauf des auf dem Produkt angegebenen Verfalldatums benutzen</li> <li>• Für Kinder unzugänglich aufbewahren</li> <li>• Bei Raumtemperatur aufbewahren</li> <li>• Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn die Versiegelung des Verschlusses vor dem ersten Öffnen beschädigt ist</li> <li>• Nicht verwenden, wenn sich die Farbe der Lösung verändert hat</li> <li>• Bei der Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten zwischen den Anwendungen mindestens 5 Minuten liegen.</li> </ul>		

**Warnhinweise**


Wenn Sie anhaltende Probleme haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Augenarzt.

**Wie ist das Produkt erhältlich?**


**OPTIVE PLUS®** ist in Kunststofffläschchen mit 3 (unverkäufliches Muster) oder 10 ml erhältlich.



**Hersteller:**  
Allergan Pharmaceuticals Ireland  
Castlebar Road  
Westport, Co. Mayo  
Irland



® 2014 Allergan, Inc.  
® mark owned by Allergan, Inc.

 0459 